

# VOORDIQ® VÅRTOR

Bruksanvisning VOORDIQ™ VÅRTOR

**Läs noga igenom bruksanvisningen innan du börjar använda VOORDIQ™ VÅRTOR.  
Endast för utvärtes bruk. Får endast användas på vuxna samt barn över 4 år.  
Med VOORDIQ™ VÅRTOR behandlar du vårtor genom frysning.**

## Innehåll

- 1 st Bruksanvisning
- 1 st Behållare med permanent applikator. Dimetyleter 38 ml
- 16 st Rengöringsdukar
- 8 st Skyddsplåster

## Användning

VOORDIQ™ VÅRTOR är avsedd för frysning av vanliga hand- och fotvårtor. Lämpligt för vårtor 3-6 mm stora.

## Vårtor och behandling av vårtor

Vårtor orsakas av viruset Human Papillom Virus (HPV), ett mycket smittsamt virus som är vanligt förekommande i vår miljö. Vårtor på händerna är vanligtvis skrovliga och har ett "blomkålsliknande" utseende till skillnad från fotvårtor som vanligtvis har en hård yttre yta och små svarta prickar i mitten. Fotvårtor uppträder vanligtvis på undersidan av foten.

Vårtor kan vara smärtsamma, obehagliga, samt har en tendens att återkomma. Det är att föredra att behandla vårtor i ett tidigt skede så effektivt som möjligt. Frysbehandling är generellt erkänt som den mest effektiva tekniken vid behandling av vårtor.


Frysvätskan i VOORDIQ™ VÅRTOR appliceras direkt på vårtan och den totalt inkapslade vårtan fryses ner på djupet. En behandling är normalt tillräcklig. Den behandlade vårtan kommer gradvis att försvinna eller falla av inom 10-14 dagar efter avslutad behandling.

## Hur använder du VOORDIQ™ VÅRTOR?


**Notera;** Avlägsna inte applikatoren från behållaren.



Se till att vårtan pekar uppåt, vänd behållaren med applikator så att öppningen på applikatoren pekar nedåt. Placera applikatoren över vårtan och var noga med att kanten på öppningen ligger tätt emot huden.

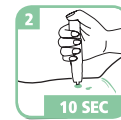

Fyll applikatoren med frysvätskan genom att trycka bestämt med tummen tre gånger i botten på behållaren. Håll kvar behållaren med applikatoren mot vårtan i minst 10 sekunder. Tag därefter bort behållaren från vårtan.

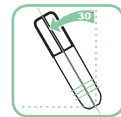

Håll behållaren så vertikalt som möjligt, max 30', för en så effektiv behandling som möjligt.

Efter användning, rengör öppningen på applikatoren med en rengöringsduk.

Om vårtan är svullen eller mycket känslig efter behandlingen, sätt ett plåster över vårtan som ett extra skydd. **Notera:** Det är möjligt att känna en mindre smärta eller stickande känsla i samband med eller direkt efter behandlingen. Detta kommer gradvis att försvinna.

Frysbehandling kan ge pigmentförändringar i form av ljusa eller mörka fläckar på den behandlade ytan. Detta kallas hypo- eller hyperpigmentering och är en förekommande biverkning vid frysbehandling. Vid behandling enligt bruksanvisningens instruktion kommer dessa fläckar gradvis att försvinna.



# VOORDIQ® VÅRTOR

## Bruksanvisning VOORDIQ™ VÅRTOR

### Tänk på!

I de flesta fall räcker det med en behandling. Ibland kan fryseffekten förbättras genom att vårtan först mjukas upp i varmvatten. Om inte vårtan försvinner inom två veckor, upprepa behandlingen. Behandla inte samma vårta fler än fyra gånger (vänta alltid två veckor mellan behandlingarna). Om behandlingen inte lyckas efter fyra gånger, rådgör med medicinskt utbildad personal. Vid behandling av en grupp vårtor som ligger tätt tillsammans, behandla varje vårta separat och vänta två veckor mellan behandlingarna. Om du fryser större eller besvärligare vårtor kan du repetera behandlingen. Vänta dock 10 sekunder innan du påbörjar den andra frysningen. Om du är osäker på huruvida det är en vårta eller inte, rådgör med medicinskt utbildad personal.

### Efter behandling

- Kan blåsa uppstå, punktera ej blåsan. Skydda blåsan med plåster eller kompress, kroppen kommer att absorbera vätskan.
- Håll det behandlade området rent.
- Klia inte på den behandlade vårtan.
- Lättare smärta eller stickande känsla kan uppträda, mindre svullnad kan förekomma.
- Det är tillåtet att bada och duscha efter behandlingen.

### Eventuella biverkningar

Följs inte instruktionen i bruksanvisningen kan detta leda till eventuell skada på hud så som de-pigmentering och/eller skada på övre hudlagren. Kontakta medicinskt utbildad personal om det uppstår infektion eller annan komplikation

### Kontraindikation

VOORDIQ™ VÅRTOR ska inte användas;

- På barn under 4 år
- På personer med diabetes eller andra cirkulationsproblem
- När huden är irriterad eller inflammerad
- Om du inte är säker på att det är en vårta
- På känsliga hudområden så som nacke, armhålor, bröst och rumpa
- I ansiktet
- På genitala vårtor
- På födelsemärken, (håriga) leverfläckar, skönhetsfläckar eller på andra hudförändringar
- Vid överkänslighet eller allergi mot kyla (köldallergi)
- På kraftigt pigmenterad hud
- Tillsammans med andra vårtbehandlingsprodukter

### Faro och Skyddsangivelser

- Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
- Förvaras oåtkomligt för barn.
- Inandas inte sprej.
- Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppnen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
- Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
- Skyddas från solljus.
- Får inte utsättas för temperaturer över 50°C

Om du avser att använda VOORDIQ™ VÅRTOR under graviditet eller vid amning, rådgör först med medicinskt utbildad personal. **Vid all eventuell tveksamhet, rådgör med medicinskt utbildad personal! Mer information om VOORDIQ™ VÅRTOR finns på [www.voordiq.com](http://www.voordiq.com)**



Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala föreskrifter

Tillverkad för:  
Skaftø Medlab  
Apelrødsvägen 1  
439 32 Onsala  
Sverige



Koninklijke Utermöhlen NV  
De Overweg 1  
8471 ZA Wolvega  
The Netherlands

Konsumentkontakt [customer-care@voordiq.com](mailto:customer-care@voordiq.com)

CE  
0344